

CONE DE PAPEL
Easy

STERILE Produto esterilizado

2 Uso Único

2 anos após sua fabricação

Manter afastado da luz solar


Manter Seco

15°C 30°C Temperatura de Armazenamento

REGISTRO ANVISA: 80104140019

Cones de Papel Absorvente Odontológico

Os cones de papel absorvente odontológico é destinado a remoção de umidade do interior dos canais radiculares após reparo e lavagem dos canais.

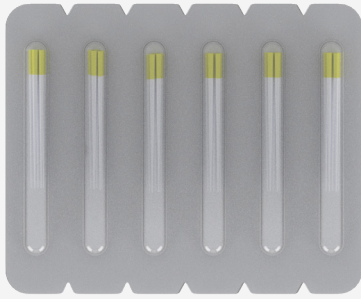

Caixa com 60 ou 120 unidades.

Contraindicação e reações adversas:

O cone de papel é contraindicado para pacientes que apresenta, alergia conhecida à fibra de algodão puro.

Precauções:

- Antes de manipular qualquer dispositivo médico estéril, incluindo cones de papel, os profissionais de saúde devem lavar as mãos cuidadosamente com água e sabão, o uso de luvas estéreis também é recomendado.
- Conheça a composição do cone de papel para evitar reações alérgicas ao paciente sensíveis a qualquer componente do material.
- Manipule o cone com cuidado para evitar danos antes da inserção no canal radicular, assegurando sua eficácia.
- Após o uso, descarte a sobra do material de acordo com as regulamentações locais para evitar contaminação ambiental.
- O procedimento deve ser realizado por dentistas treinados para garantir a técnica correta e segura.
- Antes da inserção, verifique visualmente se o cone está íntegro, sem fissuras ou danos que possam comprometer sua eficácia.

Utilização:

O modo de uso dos cones de papel absorvente odontológico é bastante simples. Após o reparo mecânico dos canais gerando uma formatação adequada, os cones de papel são inseridos para promover a remoção de umidade do interior dos canais, com o intuito de melhorar a obturação dos mesmos, os cones são inseridos, imediatamente removidos do interior dos canais e, em seguida, descartados.

Composição:

Fibra de algodão puro com ponta cônica, com boa absorção de água, dura e dúctil.

Somente para uso odontológico

Princípio de funcionamento / Mecanismo de ação:

Os cones de papel absorvente odontológico funcionam por meio de sua estrutura porosa, que permite a absorção rápida da umidade dos canais radiculares. Estes cones de papel apresentam diversos calibres para serem usados de acordo com a anatomia dos canais radiculares. Ao promover um ambiente livre de umidade dentro dos canais radiculares, permitem uma obturação ou secamente de melhor qualidade que vai influenciar no sucesso do tratamento endodôntico.

Advertências:

O cone de papel deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde treinados e qualificados. Após o uso em um procedimento odontológico, o cone de papel deve ser descartado adequadamente de acordo com as regulamentações locais. Verifique se o cone de papel está estéril e não foi violado antes do uso. Manipule o cone de papel com cuidado para evitar danos ou contaminação antes da inserção na área de trabalho. Conheça a composição do cone de papel para evitar alergias em pacientes sensíveis a algum componente do material.

Efeitos colaterais:

Os efeitos colaterais associados ao uso do cone de papel em procedimentos endodônticos são geralmente raros. No entanto, caso ocorra qualquer reação alérgica, é imprescindível que o profissional de saúde seja consultado imediatamente para uma avaliação aprofundada e orientações adequadas.

CORES	PONTAS
○	#.15/03 #.15/05
●	#.20/03 #.20/05
●	#.25/03, #.25/05
●	#.30/03 #.30/05
●	#.35/03, #.35/05
●	#.40/03, #.40/05



Produzido por Easy Equipamentos Odontológicos
CNPJ: 03.440.703/0001-29. R.T: Henrique A. Azevedo Bassi - CRO 13.540.
Barão de Paraopeba, 230 - Jardimópolis, Belo Horizonte. MG, Brasil. CEP: 30532-150.
SAC: + 55 (31) 3328-5550. Aut. Func./MS: 8.01.041-4 | Indústria Brasileira.

easyequipamentos.com.br